

[改訂版：2025/3]

■ウォーターガン



【ウォーターガン(本体)】

医療器具の洗浄毎に水道の蛇口やレバーを操作する手間を省くことができ、効率よく洗浄が可能なウォーターガンです。

また、接液部はオール樹脂製であり、金属イオンの溶出や錆の心配がなく、よりクリーンな洗浄環境にも対応しています。

■ウォーターガン (標準セット)

ご注文番号	KN-993-05
サイズ (mm)	重量：600g
セット内容	ウォーターガン・シャワーノズル・ストレートノズル ブレードホース継手・ブレードホース (4m)
仕様	使用流体：水 (高温・ガス・溶剤は不可) 耐圧：0.4Mpa 使用温度範囲：5~40℃
材質	本体/PP、耐圧ホース/軟質PVC
価格	¥28,000

注意

- 下記の取り扱いをすると製品が破損する恐れがあります。
 - 水以外の液体の使用。
 - 直射日光の当たる場所での使用。
 - 使用条件以外での使用。(温度・圧力など)
 - 本製品の分解・再組立。
 - 中性洗剤以外での本体洗浄。
 - 製品の落下及び衝撃を与える条件での使用。
- 接続の継手は付属のものを使用してください。他メーカー品の継手を使用された場合、継手部分に漏れを生じる恐れがあります。
- 継手交換の際、必要以上に締付けますと製品が破損しますので適正トルク (4.0N・m以下) で行ってください。
- 使用する水にゴミを含むラインの場合、フィルタを設置してください。ノズルの詰まりによる水の止水不良や噴射不良を引き起こします。



【KN-993-05】ウォーターガン (標準セット)

◆ストレートノズル

◆シャワーノズル



※ノズルオプション全種類



※ウォーターガンに変換用ソケットとノズル③をセット



Option 【ウォーターガン用】

※エアガンにも使用可能です。

細かい管・チューブ等のヨゴレやホコリ飛ばし最適なサイズのノズル5種類を用意しました。

■ウォーターガン用ノズルセット

ご注文番号	KN-993-05-03S
セット内容	変換用ソケット (x1) 交換用ノズル (x5) ①1.0mm径 x 33mm ②1.3mm径 x 40mm ③1.8mm径 x 54mm ④2.4mm径 x 73mm ⑤3.4mm径 x 80mm Oリング (x2) プラケース付
仕様	POM(変換用ソケット) 取り付けネジサイズ G1/8
価格	¥12,000

※エアガンにも使用可能です。



様々な太さの管・チューブ等に対応可能なテーパ付となります。



■ウォーターガン用テーパ付ノズル

ご注文番号	KN-993-34
仕様	POM
価格	¥8,000

※エアガンにも使用可能です。

既製品の劣化や紛失時の急な対応に、ぜひ予備としてお持ちください。



■変換用ソケット

ご注文番号	KN-993-32
仕様	POM
価格	¥5,400

※エアガンにも使用可能です。

■ウォーターガン用Oリング (2ヶ入)

ご注文番号	KN-993-05-202
仕様	フッ素ゴム S12
価格	¥390

※エアガンにも使用可能です。



※ノズルセット(KN-993-05-03S)+テーパノズル(KN-993-34)をセットしたものです。





■ストレートノズル (吸引管洗浄用)

ご注文番号	KN-993-05-201
仕様	PP
価格	¥29,000

※ウォーターガン専用

- 吸引管の一次洗浄
- 内腔がある医療機器の洗浄
- 鋼製小物の一次洗浄

【使用方法】

①吸引管とウォーターガンを接続してください。



※写真のウォーターガンは既製品とは異なります。

②人差し指でレバーを押すと水がでます。



③レバーから人差し指を離すと水が止まります。



■ストレートノズル (ダヴィンチインストルメント洗浄用)

ご注文番号	KN-993-05-200
仕様	PP
価格	¥29,000

※ウォーターガン専用

- インストルメントの一次洗浄
- 内腔がある医療機器の洗浄
- 鋼製小物の一次洗浄

【使用方法】

①インストルメントのフラッシュポートにウォーターガンを接続してください。

②人差し指でレバーを押すと水がでます。

③レバーから人差し指を離すと水が止まります。



※写真のウォーターガンは既製品とは異なります。



フラッシュポート①
シャフト(黒い棒)内の管内洗浄
フラッシュポート②
ハウジング(赤色カバー)内の洗浄

■エアーガン

先端に0.01μmの中空糸膜フィルタを採用し、タンク内から排出される汚れをろ過します。医療器具の洗浄後の水滴を飛ばし、効率的な乾燥が可能です。コンパクトで軽量、大流量のエアーガンです。定期的なフィルター交換も可能です。

■エアーガン (本体) クリーンルーム仕様

ご注文番号	KN-993-06
サイズ (mm)	W170 x H160 x H31 重量: 135g
セット内容	エアーガン・交換カートリッジ・プラグJS-02P付
仕様	使用流体: 空気・窒素 耐圧: 0.39Mpa (4kgf/cm ²) ろ過速度: 0.01μm
材質	本体/PP、フィルター/ポリアクリルニトリル・PP
価格	¥29,000

注意

下記の取り扱いをしないと製品が破損する恐れがあります。

- 空気、窒素以外の気体の使用。
- 本製品を侵す恐れのある雰囲気での使用。
- 直射日光の当たる場所での使用。
- 指定した条件以外での使用。(温度・圧力・使用可能範囲)
- 本製品の分解・再組立。
- 中性洗剤以外での本体洗浄。
- 圧力がかかった状態で本製品の取り外し。
- 製品の落下及び衝撃を与える条件での使用。

Option 【エアーガン用】



■フィルター交換用カートリッジ*クリーンルーム仕様

ご注文番号	KN-993-26
仕様	2個セット
価格	¥16,000



【エアーガン(本体)】



※エアーガンに変換用ソケットとノズル③をセット

※本パンフレットの表示価格に消費税は含まれておりません。
 ※印刷の色は、実際の商品の色と多少異なる場合がございますので、ご了承ください。
 ※より良い商品の開発に取り組んでおりますので、商品の規格、仕様を余儀なく変更する場合がございますので、ご了承ください。
 ※掲載商品の価格について、物価の変動や品質の改善などにより、予告なしに価格を変更する場合がありますので、ご了承ください。

株式会社 **ケルン** 本社 〒113-0033 東京都文京区本郷3-2-4-7 URL: <https://www.kerun.co.jp>

東京支店 〒113-0033
 大阪支店 〒540-0036
 福岡支店 〒812-0041
 札幌支店 〒001-0016
 東北営業所 〒983-0045
 名古屋営業所 〒460-0026

東京都文京区本郷3-2-4-7
 大阪市中央区船越町2-1-5 吉見ビル6F
 福岡市博多区吉塚3-25-12
 札幌市北区北十六条西4-2-35
 仙台市宮城野区宮城野1-12-15 松栄宮城野ビル4F
 名古屋市中区伊勢山1-8-6 SONNET HONDA102

TEL: 03-3815-6711(代)
 TEL: 06-4790-6760(代)
 TEL: 092-611-4050(代)
 TEL: 011-737-6711(代)
 TEL: 022-297-1101(代)
 TEL: 052-324-6331(代)

